

Labelkit MCD

Cartucce Modulari Dispensatrici

Abbiamo verificato che in alcune sale operatorie le cartucce Labelkit MCD non vengono utilizzate al meglio pertanto,

PER UN CORRETTO UTILIZZO

1) Nel caso non sia già in posizione far passare il nastro sotto l'apposita aletta



2) Ora la cartuccia è pronta per dispensare le etichette



3) Tirare il nastro verso il basso fino ad ottenere il distacco automatico dell'etichetta



4) Anche con una sola mano



Labelkit MCD